

Bei Hüft- und Rückenschmerzen

Rheubalmin®

WärmeGürtel



Carl Hoernecke GmbH
Hegelstraße 39
D-39104 Magdeburg
www.hoernecke.com

**Gebrauchsanweisung für Rheubalmin® WärmeGürtel
bei Hüft- und Rückenschmerzen**

ZUR EINMALIGEN ANWENDUNG

Anwendungshinweise:

Bei welchen Beschwerden wird der Rheubalmin® WärmeGürtel angewendet?

Das Medizinprodukt Rheubalmin® WärmeGürtel wird bei Verkrampfungen und Verspannungen im Hüft- und Lendenbereich angewendet. Zudem reduziert es effektiv Muskel- und Gelenkschmerzen. Wirkungsdauer: Bis zu 12 Stunden. Die wohltuende Tiefenwärme des Rheubalmin® WärmeGürtels lindert angenehm und gut verträglich Verkrampfungen und Verspannungen im Hüft- und Lendenbereich. Durch Alltagsstress strapazierte Muskeln werden durch die angenehme Wärme entspannt. Auch bei Menstruationsbeschwerden sorgt die Anwendung für eine spürbare Erleichterung.

Wie ist der Rheubalmin® WärmeGürtel anzuwenden?

- Das Sachet direkt vor der Anwendung öffnen.
- Den Gürtel auf den schmerzenden Bereich der Lendenwirbelsäule oder Hüfte positionieren und mit dem Klettverschluss fixieren.
- Die Erwärmung der Pads bis zur Höchsttemperatur dauert ungefähr 30 Minuten und gibt dann bis zu 12 Stunden wohltuende Wärme ab.
- Der Gürtel ist nur für eine Anwendung vorgesehen.
- Keine zweite Anwendung innerhalb 24 Stunden.

Wann darf der Rheubalmin® WärmeGürtel nicht angewendet werden?

- Bei Kindern unter 12 Jahren;
- Während des Schlafes;
- An einer Stelle, an der Rötungen, Entzündungen, Hautrisse, Blutergüsse oder Hautreizungen vorhanden sind;
- In Verbindung mit einzureibenden Mitteln;
- In Verbindung mit Wärmequellen;
- Bei bettlägerigen Personen und Patienten mit einer Tendenz zu Hautgeschwüren.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Bei Hautreizungen, die zu Verbrennungen führen können, Gürtel sofort entfernen.
- Nicht während des Schlafes anwenden.
- Ermöglichen Sie eine Luftzirkulation über dem WärmeGürtel und wenden Sie keinen Druck an.
- Wenn die Wärme der Pads unangenehm stark wird, beenden Sie bitte die Anwendung sofort.
- Während der Anwendung öfter den Zustand der Haut überprüfen.
- Wenn nach einer Woche der Anwendung keine Schmerzlinderung eintritt, könnte dies ein Hinweis auf eine Erkrankung sein. Wenden Sie sich dann bitte an einen Arzt.
- Bei Personen, die den Rheubalmin® WärmeGürtel nicht selbstständig entfernen können, sollte die Anwendung sorgfältig überwacht werden.
- Vor einer Magnet-Resonanz-Tomographie muss der Rheubalmin® WärmeGürtel entfernt werden, um ein Verbrennungsrisiko zu vermeiden.

- Eine 2. Anwendung ist nicht möglich, da sich keine Wärme mehr entwickelt.
- Keine Anwendung auf verletzten oder gefährdeten Oberflächen.
- Der Rheubalmin® WärmeGürtel ist nur äußerlich anzuwenden.
- Jede Zelle des Wärmepads enthält Eisenpulver, welches bei Verschlucken Schäden hervorrufen kann. Falls Sie Eisenpulver geschluckt haben, spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser aus und konsultieren Sie umgehend einen Arzt. Bei Haut- und Augenkontakt der Inhaltsstoffe den Gürtel entfernen, anschließend den betroffenen Bereich mit Wasser spülen und umgehend einen Arzt konsultieren.
- Das Risiko von Verbrennungen kann mit zunehmendem Alter steigen!
- Niemals Wärmepads in der Mikrowelle erwärmen, da sie sich entzünden könnten.

Was darf man mit Wärmepads nicht tun?

Verbrennen, knicken, zerschneiden, zerreißen, in der Mikrowelle erwärmen oder mit Flüssigkeiten in Kontakt bringen.

Der Rheubalmin® WärmeGürtel sollte nicht mehr als einmal in 24 Stunden angewendet werden.

Achtung!

Eine leichte Rötung der Haut nach der Entfernung des Rheubalmin® WärmeGürtels ist normal. Erst nach dem Abklingen dieser Rötung sollte wieder ein Wärmegürtel verwendet werden.

Rücksprache mit einem Arzt vor der Anwendung des Rheubalmin® WärmeGürtels sollte in folgenden Fällen gehalten werden:

- bei schlechter Durchblutung
- bei einer Herzerkrankung
- bei Diabetes
- bei Nervenschäden oder Einschränkungen der Sinnesfunktionen
- bei Hauterkrankungen
- Schwangerschaft
- bei Einnahme von Schmerzmitteln
- bei rheumatoider Arthritis.

Aufbewahrung

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen Ort lagern. Nicht nach dem Verfallsdatum anwenden. Die Entsorgung erfolgt über den Hausmüll.



: siehe Faltschachtel und Sachet



Hersteller:
Koolcare Technology Co., Ltd
ADD: No.6-10, A5, Shandong
International Tech Park
South Waihuan Road, Linyi
276017 Shandong, P.R. China
Facility: Wenlv Healthcare Park,
No.18, Zhenbei Road,
Xinyi city, 221400, Jiangsu, P.R. China



EU Repräsentative:
Prolinx GmbH
Brehmstr. 56
40239 Düsseldorf
info@prolinx.eu



exklusiv Vertrieb durch:
Carl Hoernecke GmbH
Hegelstraße 39
D-39104 Magdeburg
Telefon: 0391-63546-0
www.hoernecke.com

Die Gebrauchsanweisung wurde im Februar 2024 erstellt.